



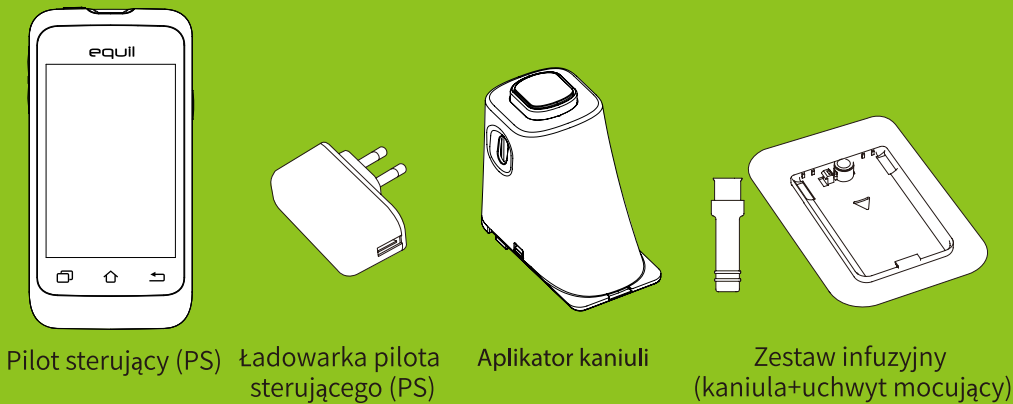

Mikro Pompa Insulinowa

Patch Insulin Pump System

Skrócona Instrukcja Użytkowania

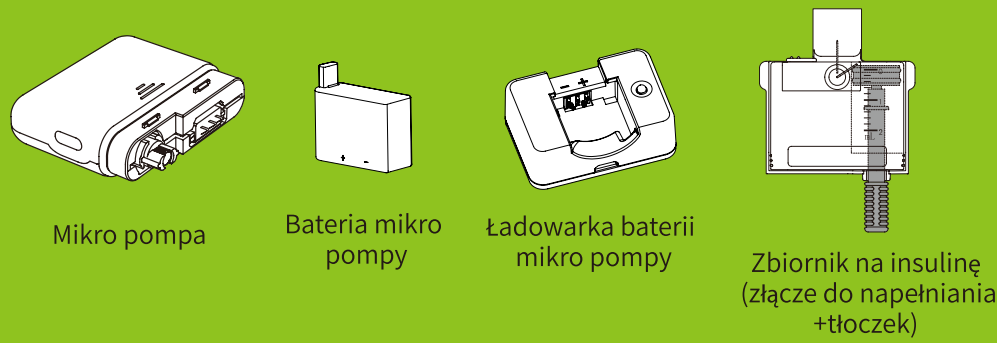

MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
No.108 Liuze St., Cangqian, Yuhang District,
Hangzhou, 311121 Zhejiang, P.R.China
www.microtechmd.com




CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo Nº 18 CP 29006,
Málaga-Spain

1001-PMTL-271. V02


1 Przygotowanie komponentów mikro pompy

Ta sekcja opisuje sposób przygotowania elementów mikro pompy: baterii, zbiorników i zestawów infuzyjnych. Zbiorniki i zestawy infuzyjne należy wymieniać co trzy dni.


1A Przygotowanie baterii.

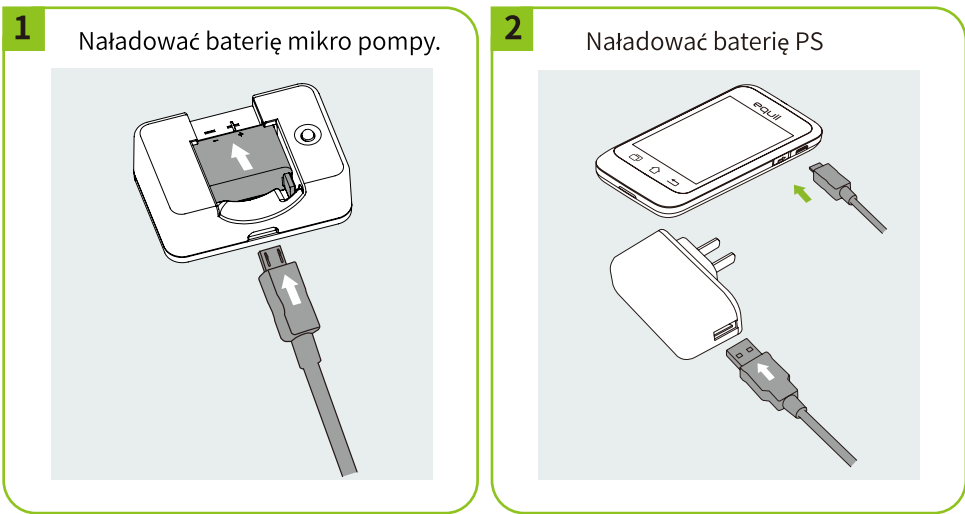

1B Przygotowanie nowego zbiornika

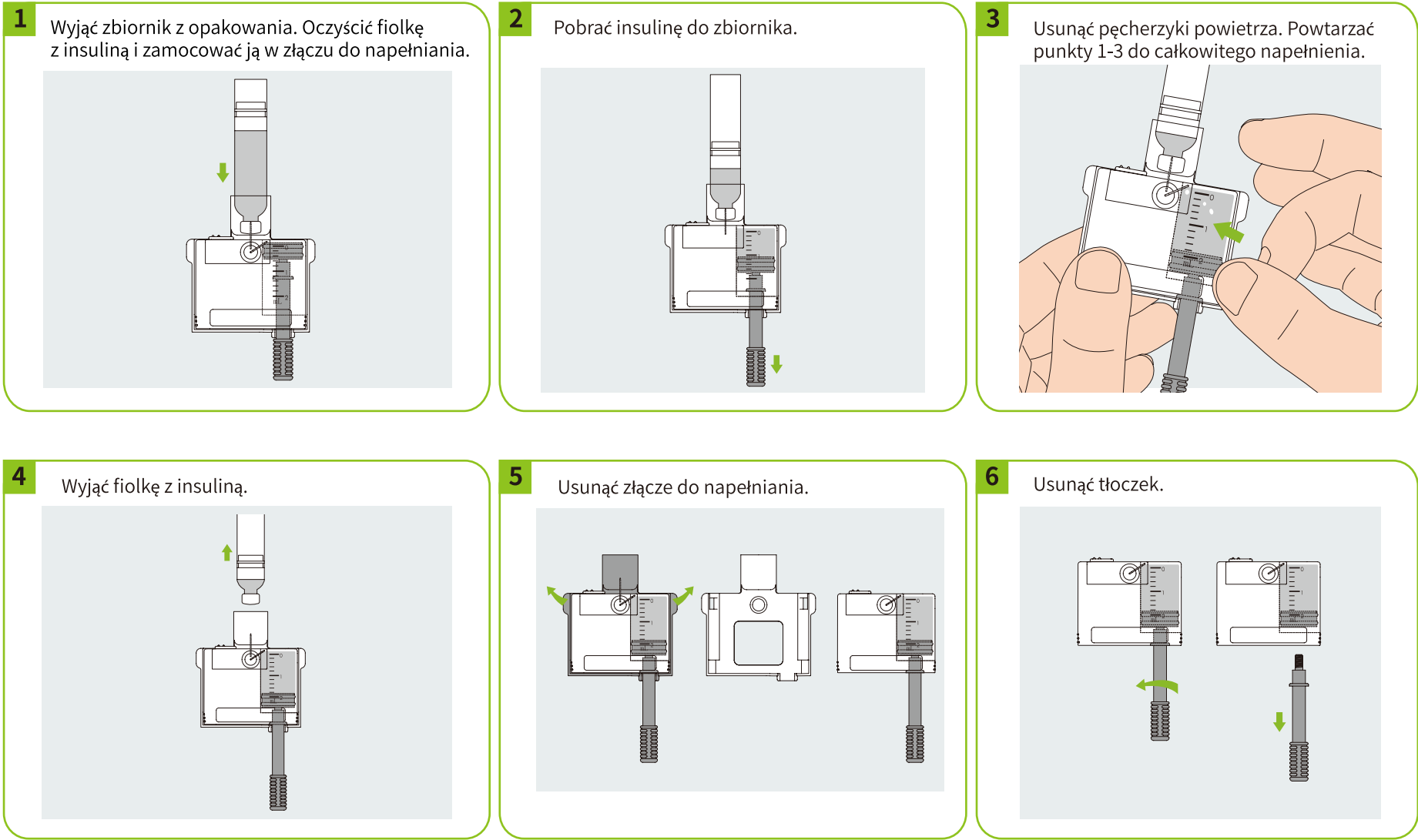

1C Przygotowanie zestawu infuzyjnego

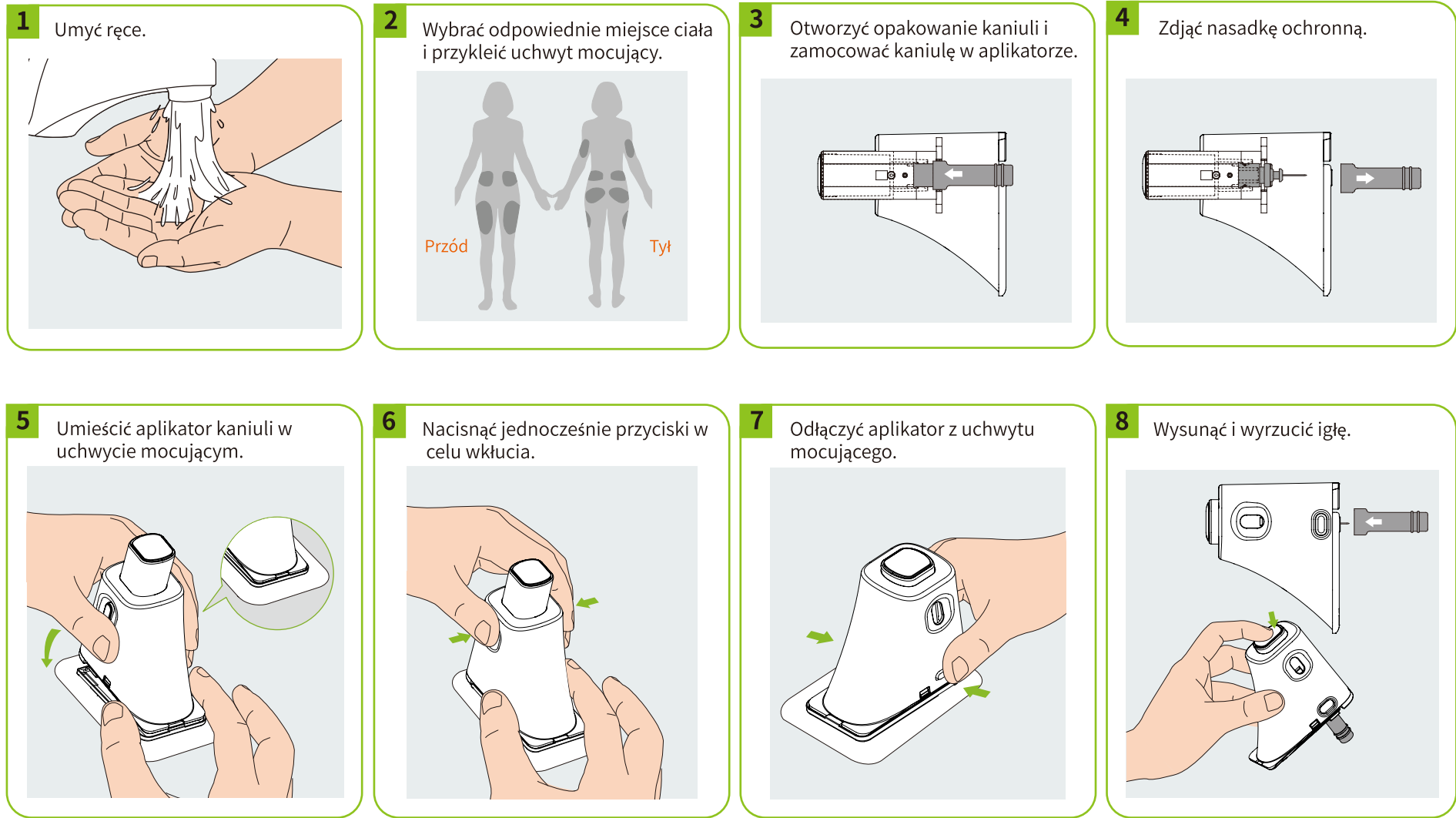

2 Wstępna konfiguracja systemu

Jeżeli pilot sterujący został uruchomiony po raz pierwszy użytkownik powinien zostać poproszony o wprowadzenie ustawień i podłączenie/parowanie nowej mikro pompy infuzyjnej.

Instalacje należy rozpocząć od przygotowania w pełni naładowanych baterii, napełnionego zbiornika i nowego zestawu infuzyjnego (patrz punkt 1).

1

Włączyć pilot sterujący (PS). Jeżeli użytkownik uruchamia PS po raz pierwszy, powinien pojawić się Kreator ustawień.

2

Kreator ustawień przeprowadzi użytkownika przez następujące ustawienia mikro pompy:

- ustawienia czasu i daty,
- podstawowe ustawienia,
- podstawowe ustawienia bolusa,
- zaawansowane ustawienia bolusa,
- ustawienia alarmu.

12:38

Kreator ustawień

Witamy w systemie Microtech do zarządzania infuzją insuliny!

Ustaw datę i godzinę

Data

02.03.2017

Godzina

12:38

Zegar 24-godzinny

✓

1 / 5

Data i godzina

Następny

Ustawienia należy wprowadzać pod nadzorem lekarza.

4

Przygotować w pełni naładowaną baterię i świeżo przygotowane akcesoria jednorazowego użytku.

5

Wprowadzić numer seryjny mikro pompy, aby ją podłączyć.

20:32

Wymień pompę

Wprowadź nr seryjny nowej pompy

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anuluj

0

equil

Patch Pump

XXXXXX

1754

Microtech Medical (Hongkong) Co., Ltd

Numer seryjny

3

Następnie PS poprosi o potwierdzenie podłączenia nowej mikro pompy. W tym celu należy nacisnąć OK.

6

Po wyświetleniu pytania, należy użyć PS do wypełniania zbiornika do momentu pojawienia się kropli insuliny.

7

Podłączyć mikro pompę do uchwyty mocującego zestawu infuzyjnego.

8

Wypełnić kaniulę.

20:42

Wymień zbiornik/baterię

Wypełnij kaniulę

Wypełnij kaniulę

Pomiń

Zakończ

3 Zmiana akcesoriów jednorazowych

Rozpocząć od przygotowania w pełni naładowanych baterii, napełnionego zbiornika i nowego zestawu infuzyjnego (patrz rozdział 1).

1

Usunąć stary uchwyt mocujący zestawu infuzyjnego i mikro pompę z ciała.

2

Za pomocą PS należy rozpocząć Zmianę zbiornika/baterii.

20:43

OBSŁUGA

Wymień zbiornik/baterię

Wprowadź odczyt SG

Wymień pompę

Baza danych żywności

Odtwarzacz audio

3

Wyjąć mikro pompę z uchwyty mocującego zestawu infuzyjnego.

4

Złożyć w pełni naładowaną baterię i świeżo przygotowane akcesoria jednorazowego użytku.

5

Po wyświetleniu pytania, należy użyć PS do wypełniania zbiornika do momentu pojawienia się kropli insuliny.

6

Podłączyć mikro pompę do uchwyty mocującego zestawu infuzyjnego.

7

Wypełnić kaniulę.

20:42

Wymień zbiornik/baterię

Wypełnij kaniulę

Wypełnij kaniulę

Pomiń


Zakończ




1 Przygotowanie komponentów mikro pompy

Ta sekcja opisuje sposób przygotowania elementów mikro pompy: baterii, zbiorników i zestawów infuzyjnych. Zbiorniki i zestawy infuzyjne należy wymieniać co trzy dni.


1A Przygotowanie baterii.

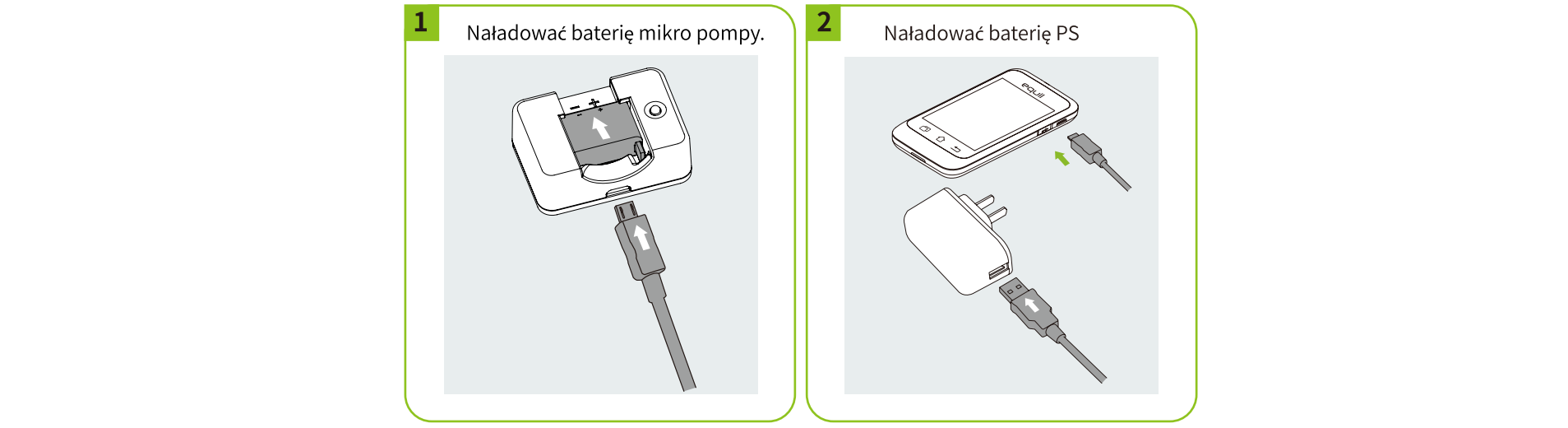

1B Przygotowanie nowego zbiornika


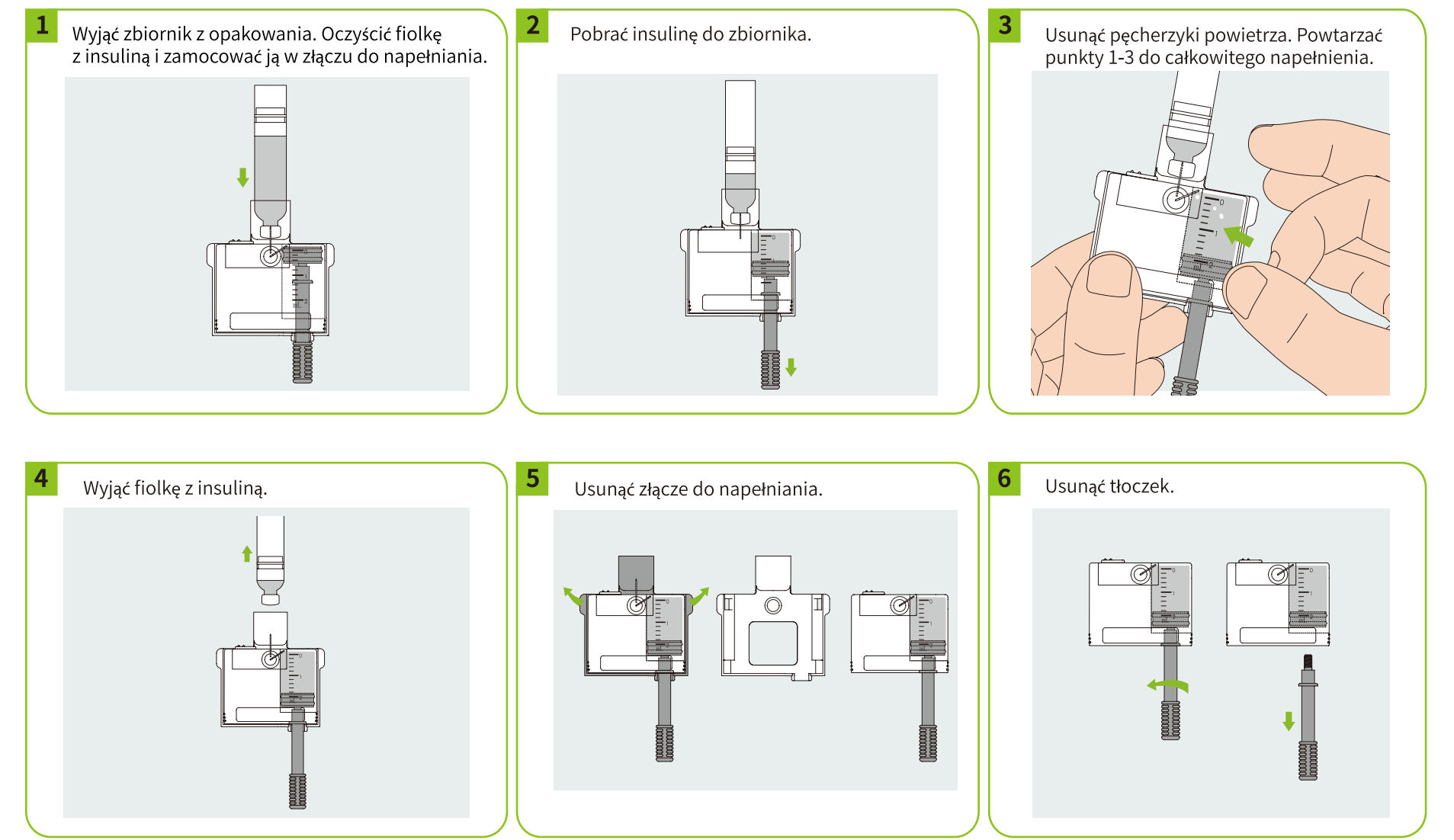


1C Przygotowanie zestawu infuzyjnego

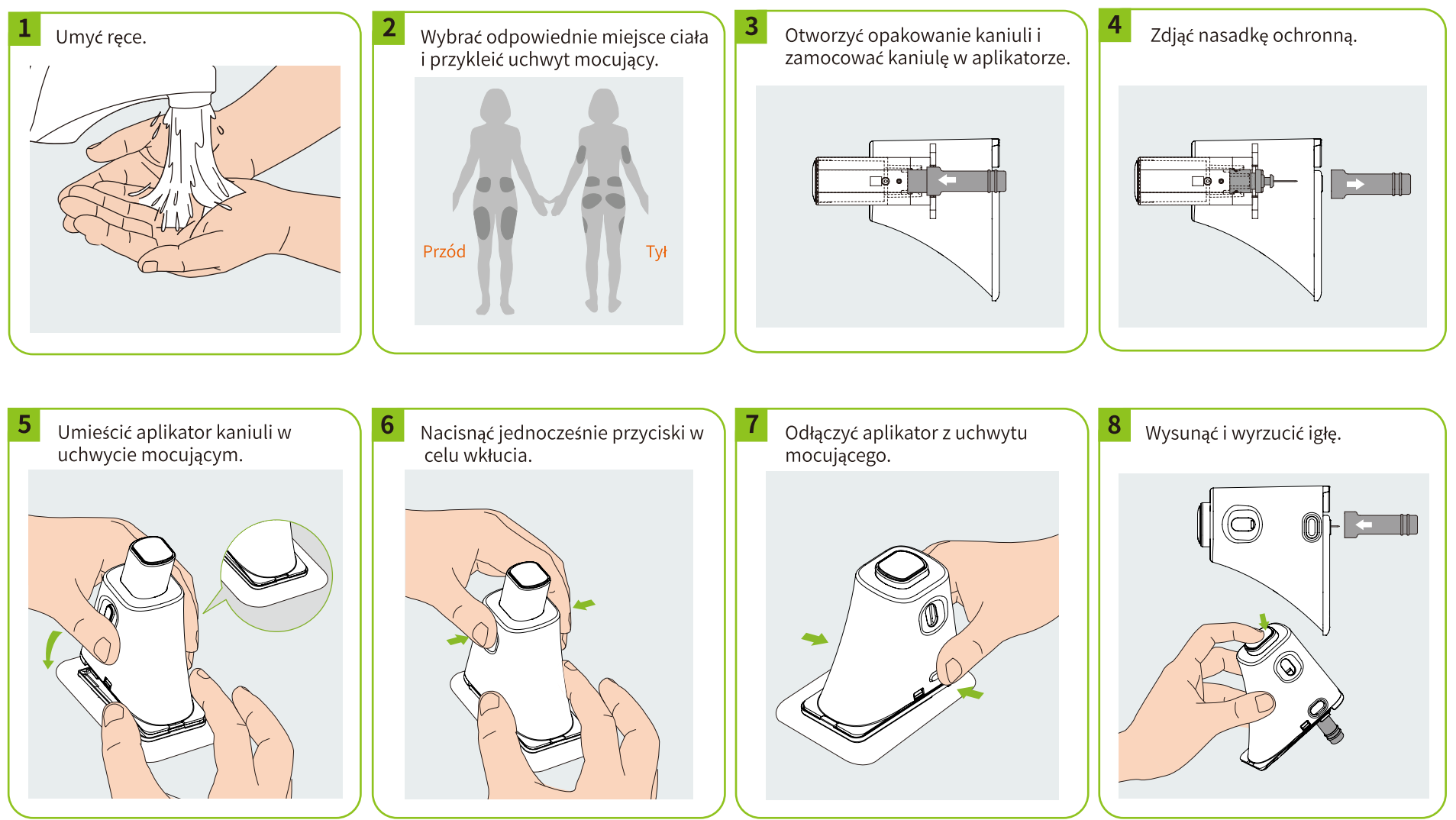


2 Wstępna konfiguracja systemu

Jeżeli pilot sterujący został uruchomiony po raz pierwszy użytkownik powinien zostać poproszony o wprowadzenie ustawień i podłączenie/parowanie nowej mikro pompy infuzyjnej. Instalację należy rozpocząć od przygotowania w pełni naładowanych baterii, napelnionego zbiornika i nowego zestawu infuzyjnego (patrz punkt 1).

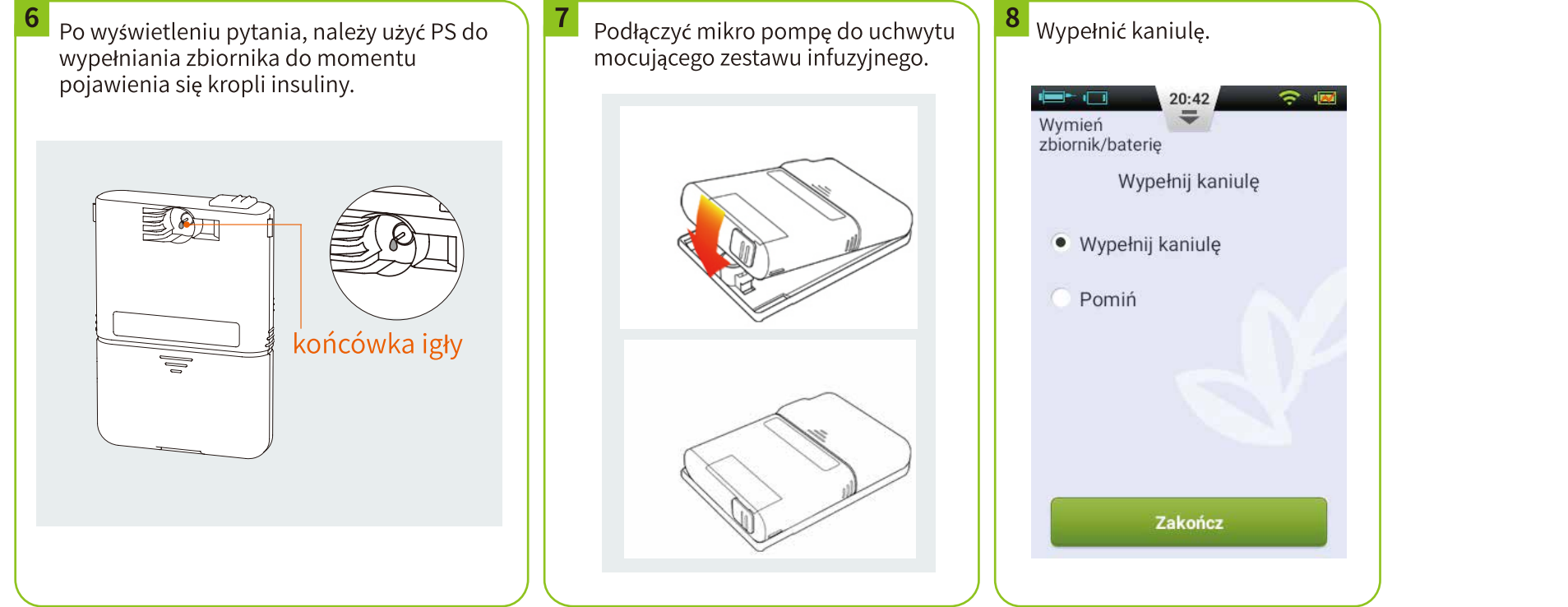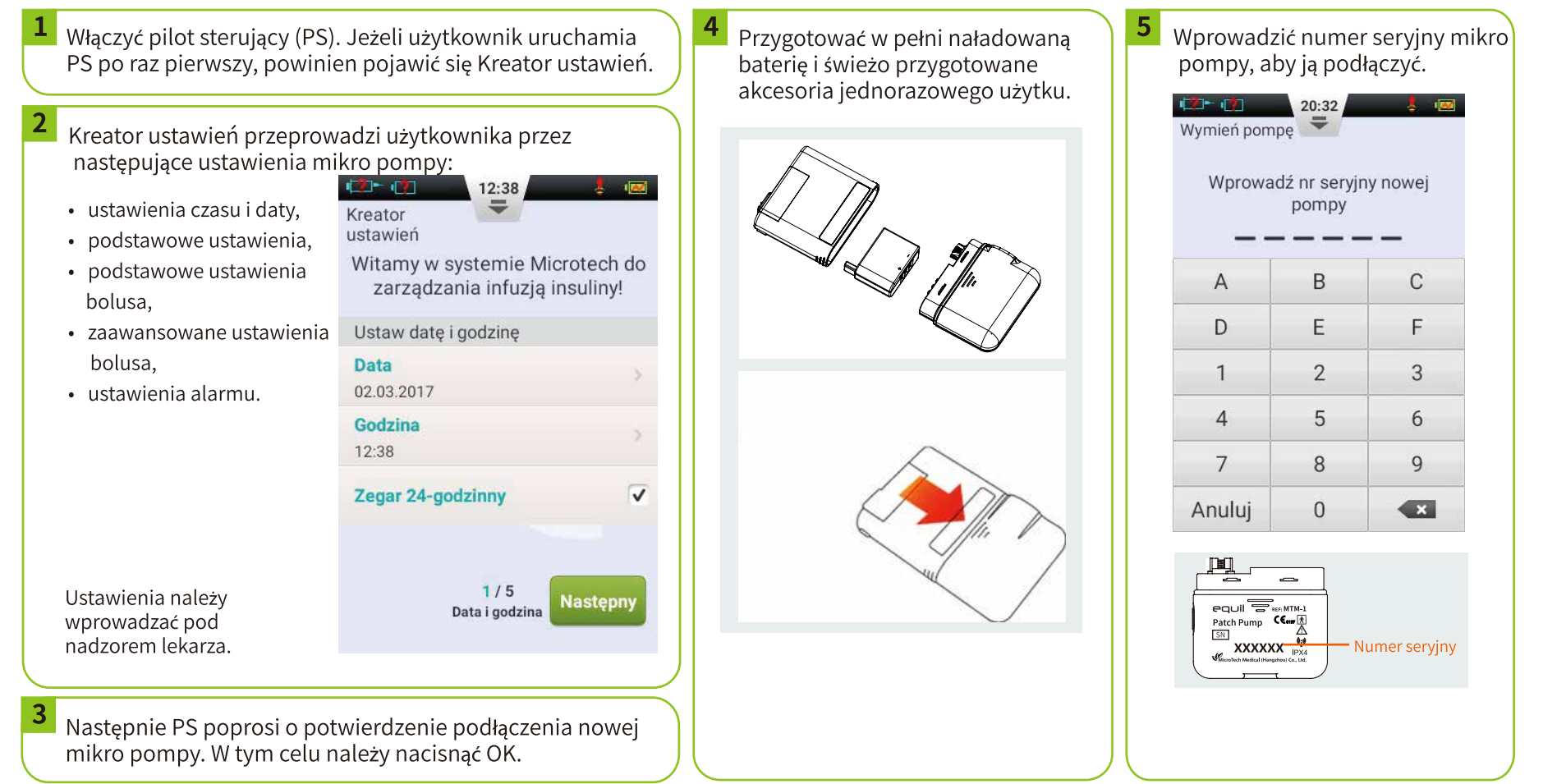


3 Zmiana akcesoriów jednorazowych

Rozpocząć od przygotowania w pełni naładowanych baterii, napelnionego zbiornika i nowego zestawu infuzyjnego (patrz rozdział 1).

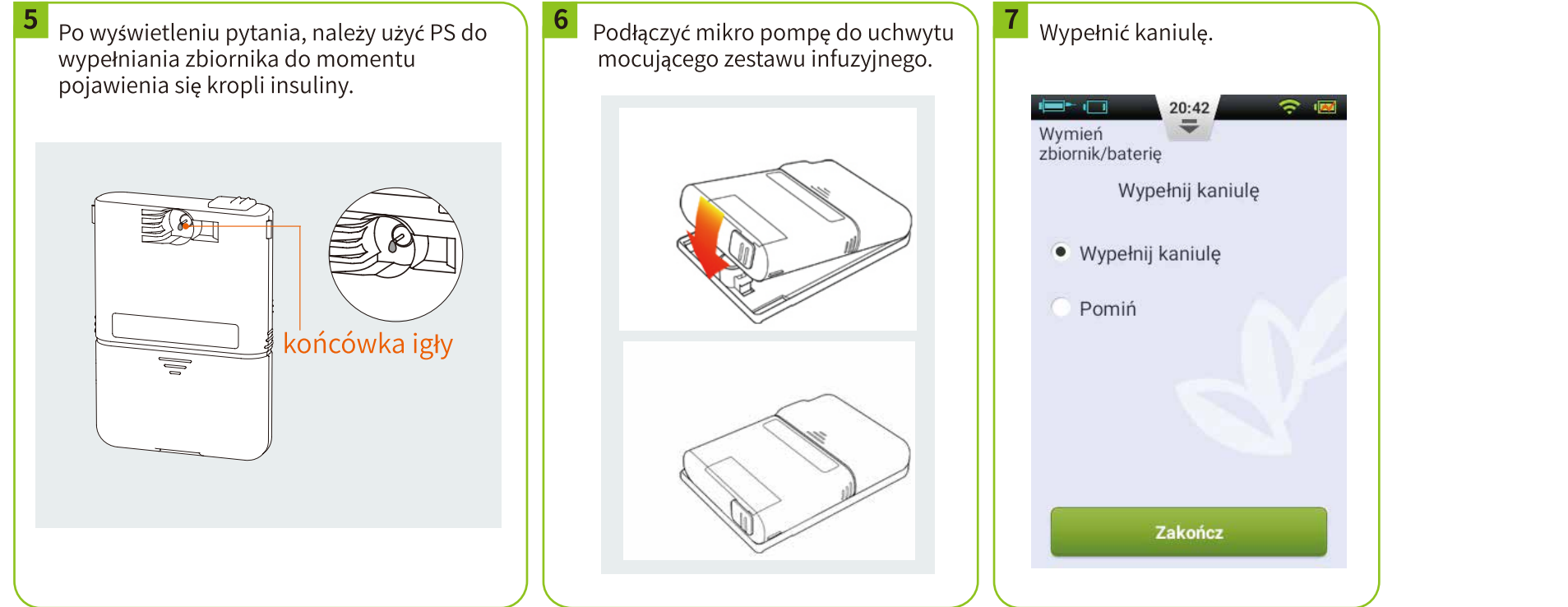

折叠方式示意:

外折线 ————
内折线 - - - - -

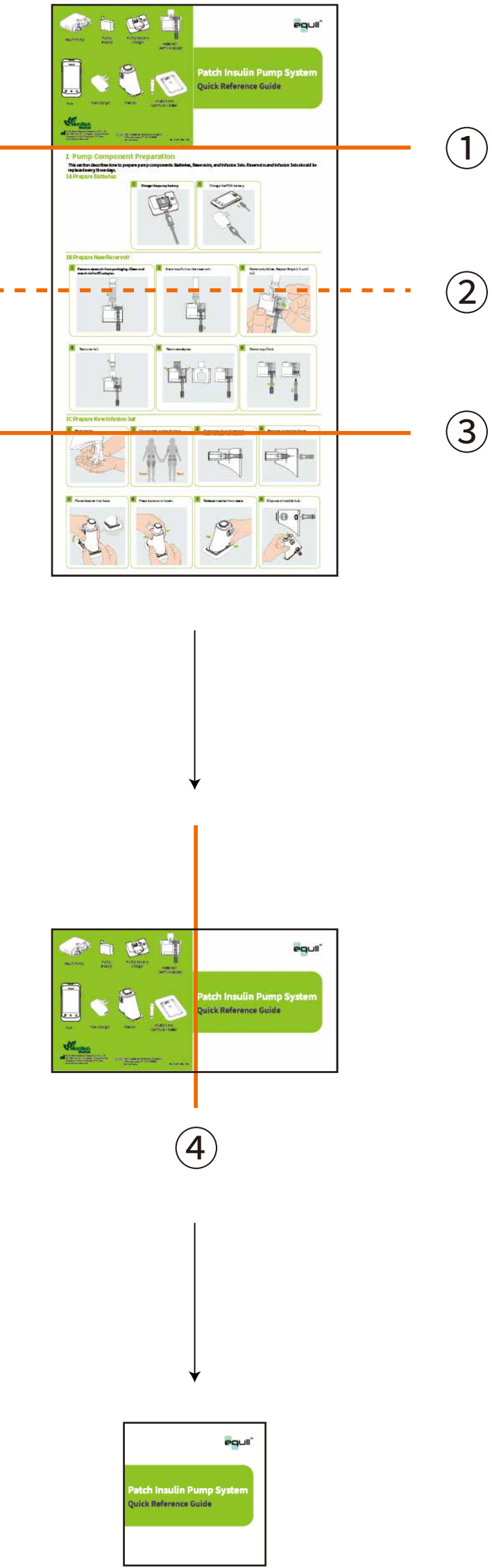

折叠后尺寸140*140mm,
封面朝外



本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。

本图纸应与说明，产品状况，产品结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。

图档中所有尺寸比例为1:1。
公差: L(长)*(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm

项目信息

名称	胰岛素泵快速操作卡（波兰语）
图纸号	
物料号	1001-PMTL-271
版本号	V02

版本变更描述
1. 更新欧代地址
2. 3. 2寸PDA改为3. 5寸

发放范围 生产（ ）采购（ √ ）计划（ √ ）其他：

切刀 ————
压线 ————
开槽 ————
半穿 ————
粘合 ————

备注
无印刷

尺寸： 280*560mm

印刷颜色： 四色印刷

材质： 105g铜版纸

特种工艺：

备注：

设计审核

设计

审核

批准

生效日期

日期